



Productoverzicht

Download de software via <https://www.microlife.com/support/software-professional-products> en klik op **WatchBP Office 2G - Analyzer**

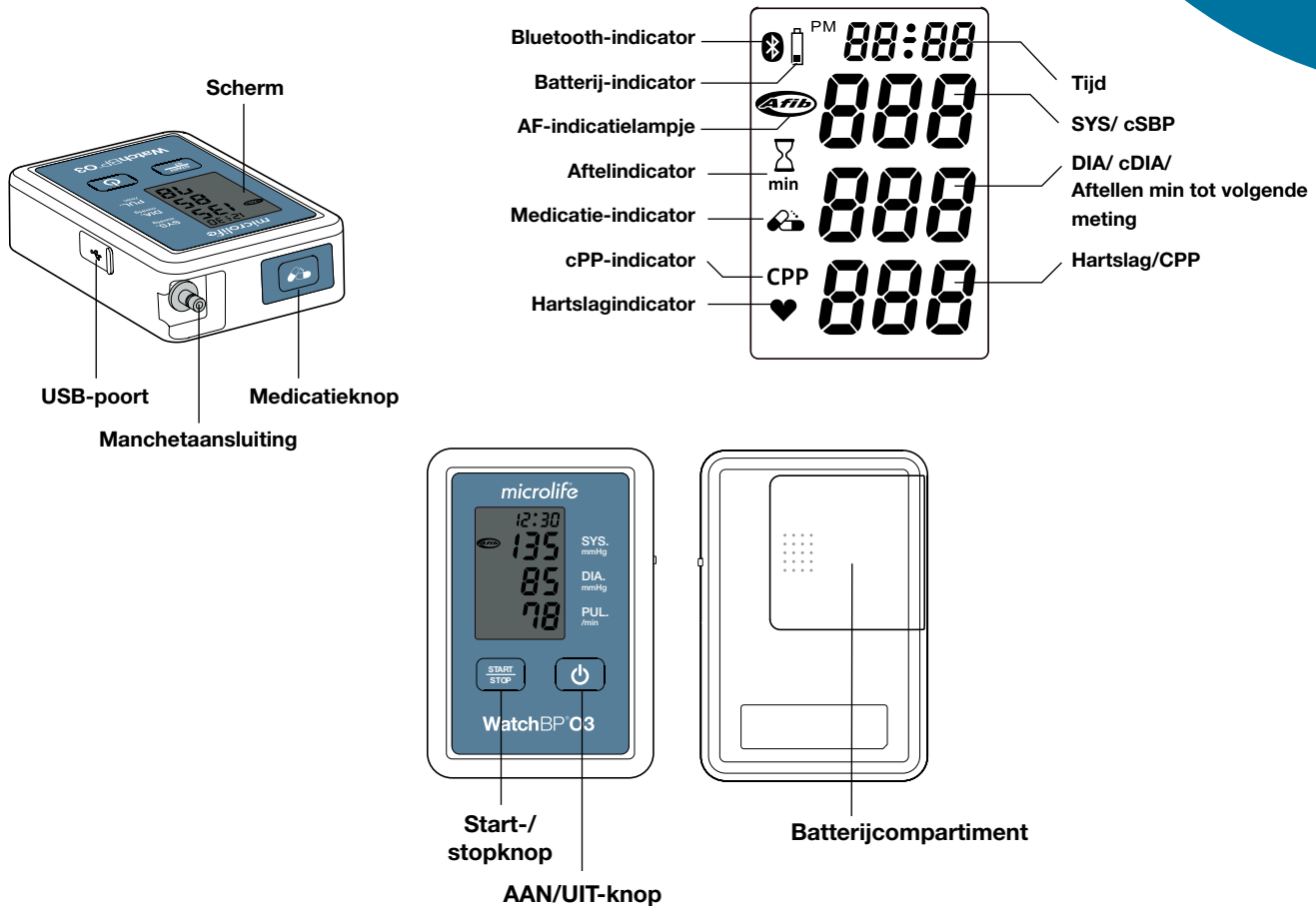

1 Software instellen

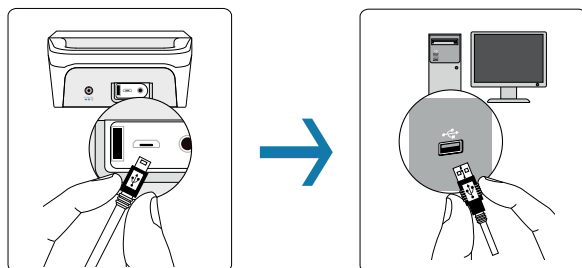

Plaats 4 stuks **AAA batterijen** in de bloeddrukmeter. Druk op de -knop.

Plaats de **USB kabel** in de **USB poort** en koppel deze aan de PC.


Open nu de **WatchBP Analyzer** software.

Rechts bovenin kunt u de taal instellen.



Klik op **nieuw** en vul de gevraagde gegevens in. U kunt het invullen van email en telefoonnummer overslaan.


Klik vervolgens op **oke**.

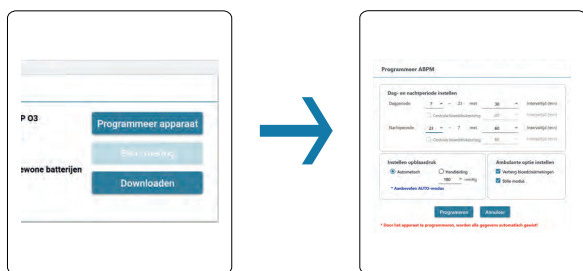

Programmeerbare meetintervallen instellen

Selecteer de patiënt en klik op “**programmeer apparaat**”.

Het apparaat kan automatisch metingen uitvoeren op vaste te programmeren intervallen van 5, 10, 15, 20, 30 of 60 minuten voor zowel waak- als slaaperperioden.

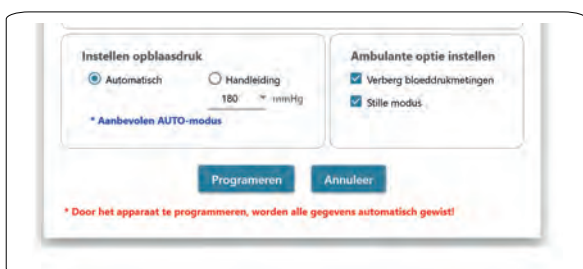

Dag- en nachtperiode (twee meetperioden)


De waak-(dag)meetperiode kan worden geprogrammeerd om op een willekeurig uur tussen 00 en 23 te beginnen, en de slaap-(nacht)meetperiode kan worden ingesteld op elk uur tussen 00 en 23.

Selecteer “**programmeren**” (wacht daarna een ogenblik).

Klik vervolgens op “**oke**”.


Koppel de 24-uurs meter los van de computer.

2 Meter aan patiënt meegeven

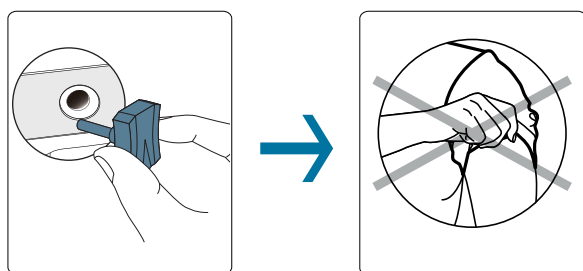

Plaats de **connector** in de **manchetaansluiting**.

Verwijder alle kleding die de meetarm bedekt of blokkeert.

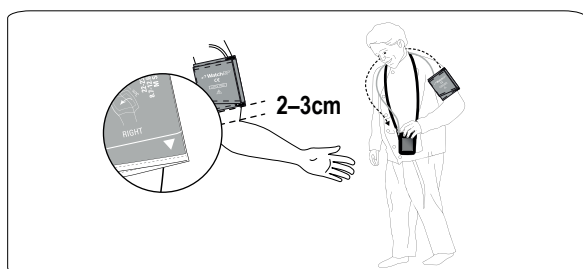

Breng de **manchet** losjes en niet te strak aan. Zorg ervoor dat de manchet **2-3 cm** boven de linker elleboog komt met de slang aan de binnenkant van de arm.

De manchetslang moet omhoog wijzen en moet over de andere schouder van de patiënt naar de andere kant van het lichaam worden geleid.


Doe een eenmalige **testmeting** door op “**start**” te drukken.

Na de testmeting ziet u een getal staan wat laat zien over hoeveel minuten de eerstkomende meting volgens het ingestelde **protocol** gaat plaatsvinden. Elk halve uur en elk hele uur.

Plaats vervolgens de **24-uurs meter** op de juiste manier bij de patiënt in het tasje.

Geef de patient het **dagboekje** met gebruiksaanwijzingen mee.

3 Uitlezen van de meter

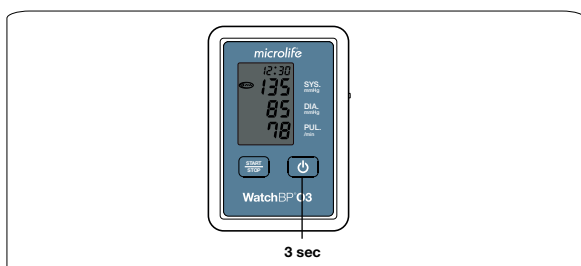

Bij ontvangst van de 24-uurs meter of het stoppen van de metingen, dient u de  3 seconden ingedrukt te houden dan gaat de bloeddrukmeter uit.

Op het ogenblik van uitlezen dient de meter wel aan te staan.

Koppel de 24-uurs meter met **USB** aan de computer.

Selecteer de **patiëntgegevens**.



Selecteer “**downloaden**”.


Selecteer “**doorgaan**”.

Klik vervolgens op “**oke**”.



Selecteer “**datum en tijd**” bij “**map**”.

Selecteer “**rapportage**”.

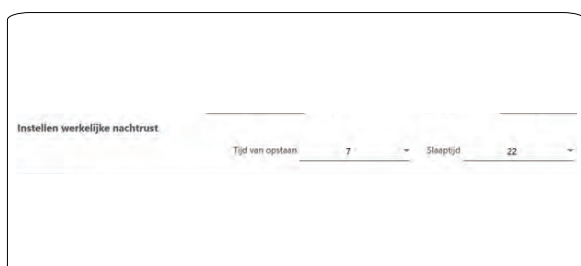

Vul de daadwerkelijke tijd waarop de patiënt is gaan slapen en daadwerkelijk is wakker geworden naar aanleiding van het ingevulde **dagboekje**.

4 Analyseren en opslaan

Maatwerk

Arts: Microlife

Praktijk / Ziekenhuis: Hospital

Aangepast logo:

Rapportmap: C:\Microlife\WatchBP Analyz

Genereer PDF-rapport

WatchBP O3

Ambulante bloeddruk
Rapportage

Patiënt-ID: Test
Naam: Test
Geslacht: Man
Leeftijd: 50
Geboortedatum: 08.09.1991

Dag- en nachtperiode		TIJD	INTERVAL
Dag:	7 - 22 h	5 min	
Nacht:	22 - 7 h	60 min	

Werkelijk dag / nacht

Wakker: 7 - 22 h
In slaap: 22 - 7 h

Bloeddruksgrenswaarde

24 uur: 130/80 mmHg
Dag: 135/85 mmHg
Nacht: 120/70 mmHg

De metingen kunnen opgeslagen worden in PDF. Klik op “**genereer PDF-rapport**”.

Nu verschijnen alle metingen in een Adobe PDF rapport. Sla het bestand op en print indien gewenst.

Patiënt verwijderen?

Hiermee worden de geselecteerde patiënt en zijn gegevens verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

Ja **Nee**

Na het verwerken van het PDF-rapport in de HIS kunnen de patiëntgegevens worden gewist.

Selecteer de **patiëntgegevens**.

Selecteer “**verwijderen**”.