



Productoverzicht

Download de software via <https://www.microlife.com/support/software-professional-products> en klik op **WatchBP Office 2G - Analyzer**

Korte handleiding
voor een
30 minuten
bloeddrukmeting

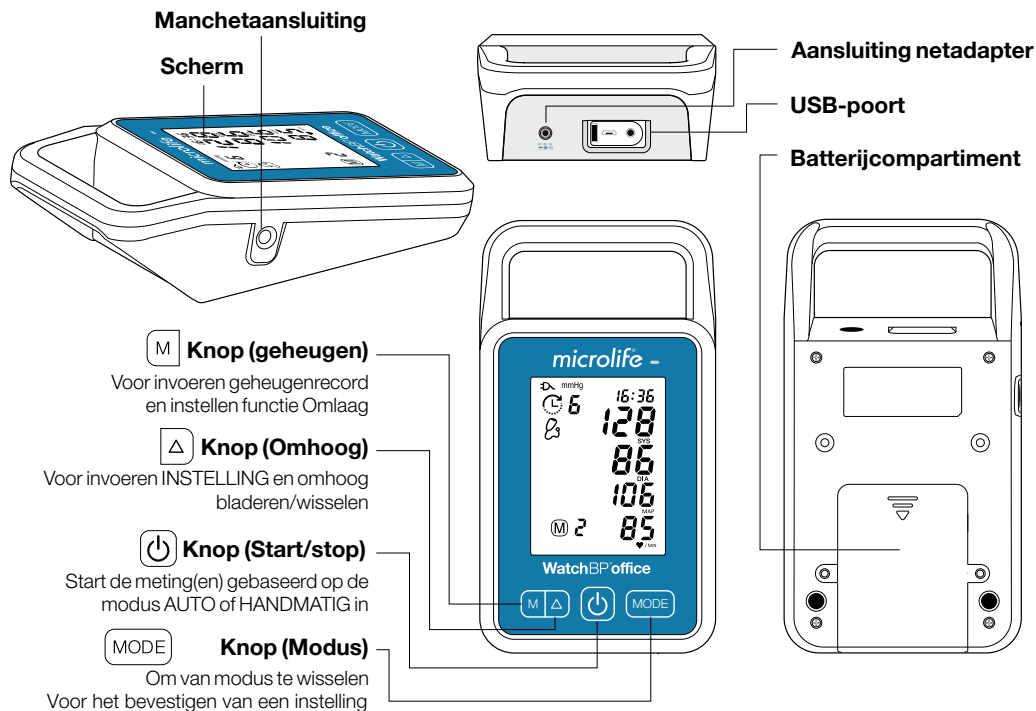


1 Start een meting

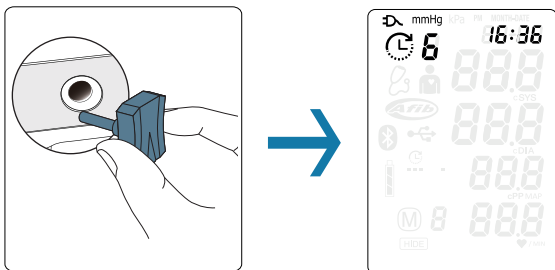

Plaats de **connector** in de **manchetaansluiting** en zet het apparaat aan. De meter staat automatisch voor u ingesteld om een juiste 30 minuten meting te verrichten.

Controleer alleen of het getal “6” links boven in het scherm verschijnt.

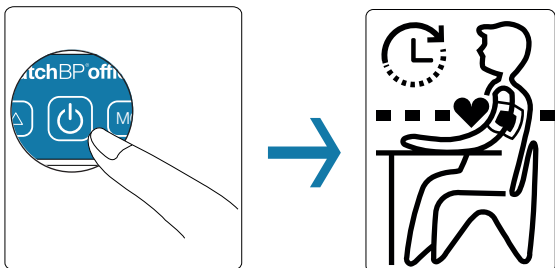

Druk op de **Knop (Start/stop)** en verlaat de kamer waar de patiënt zich bevindt.

Zorg ervoor dat de patiënt **gedurende 30 minuten in volledige rust** is en niets doet.




Na 30 minuten is de bloeddrukmeting **automatisch voltooid** en kunt u deze **afkoppelen** van de patiënt.

2


Uitlezen van de meter

WatchBP

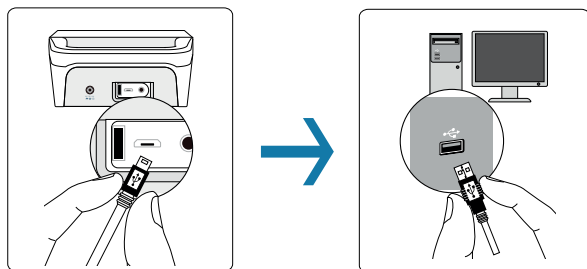


Plaats de USB kabel in de USB poort en koppel deze aan de PC.

Open nu de **WatchBP Analyzer** software.

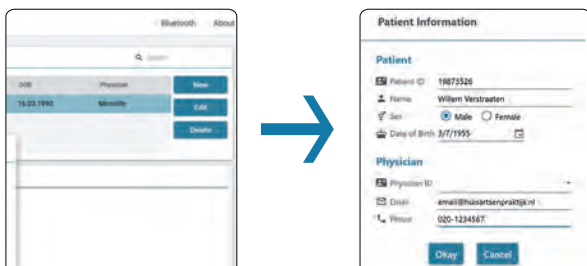

Klik op **nieuw** en voer de opgevraagde patiëntgegevens in en klik vervolgens op **oke**.

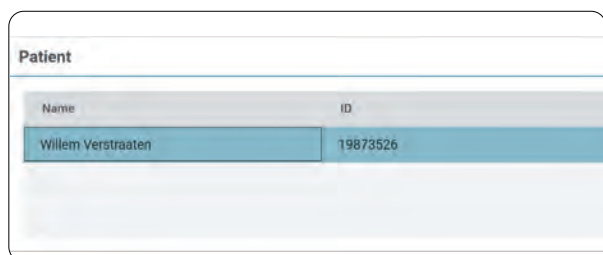


Selecteer nu de patiënt in het overzicht en klik op **downloaden**. De metingen worden nu in de software geladen.

Nu ziet u bij **map** een datum met tijdstip waarop de meting heeft plaatsgevonden. **Klik** hierop.


3

Analyseren & opslaan

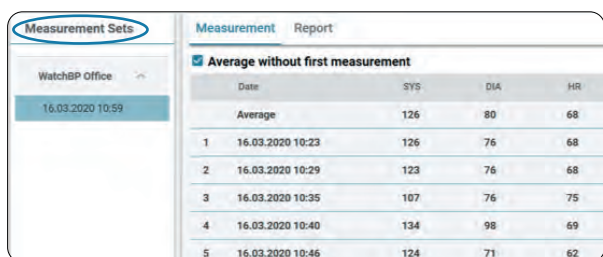

Alle metingen verschijnen nu in beeld.

Vink nu **gemiddelde zonder eerste meting** aan om de 1e meting niet mee te laten tellen in de berekening van het gemiddelde.

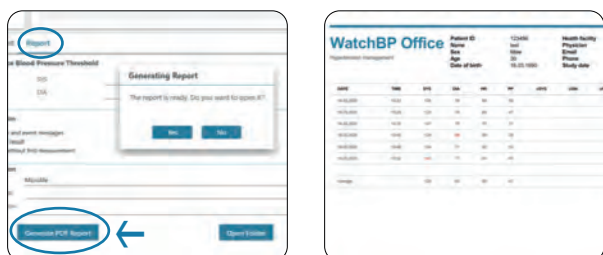

De metingen kunnen opgeslagen worden in PDF. Selecteer **rapportage** en klik op **genereer PDF rapport**.

Nu verschijnen alle metingen in een Adobe PDF rapport. Sla het bestand op en print indien gewenst.



Voor een nieuwe 30 minuten bloeddrukmeting hoeft u niet het geheugen te wissen. Door bij een volgende patiënt opnieuw op de **(P)**-knop te drukken wordt de vorige meting automatisch overschreven.